

Rocket® IPC™ Drainage Kit

ROCKET IPC DREENI, PIKAOHJEET - VALMISTELU JA KÄYTTÖ



1
Avaa pakkaus. Aseta pullo sinisen liinan reunalle. Varmista että pullon tyhjennysletku pysyy sinisellä liinalla



Huom!

Jos käytössä on kuvan mukainen sininen Rocket katetri: Käytä tämän sivun ohjeita



OK



Älä käytä


OK=Käyttökunnossa
Tarkista pullon osoitin. Jos osoitin on kohonnut, hylkää pullo ja ota uusi pullo



3
Laita steriilit hanskat käteen



4
Avaa ja pudota korkki, alkoholiliinat, taitokset suojapusseista siniselle liinalle

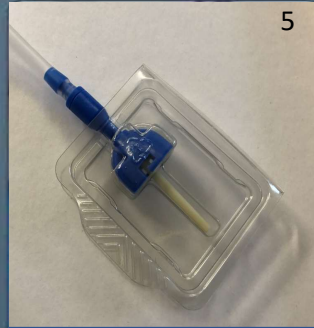


5
Poista pullosta kärjen suojus, ja aseta kärki siniselle liinalle



6
Poista katetrin pään korkki



7
Pyyhi katetrin pää alkoholiliinalla

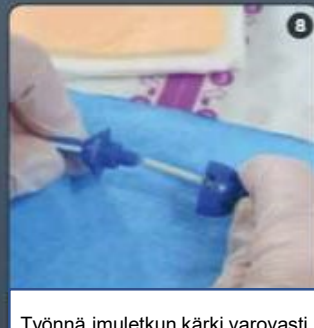

8
Työnnä imuletkun kärki varovasti katetrin päähän. Lukitse letku katetriin kiertämällä

Rocket® IPC™ Drainage Kit

ROCKET IPC DREENI, PIKAOHJEET - VALMISTELU JA KÄYTTÖ



9
Pidä toisella kädellä pulloa. Avaa valkoinen letkunsulkija



10
Dreenaus aloitetaan painamalla sinistä painiketta. Imutehoa voi säätää liukurilla. Dreenaus lopetetaan viemällä liukuri taakse.



11
Kun dreenaus on valmis, irrota dreeniletkun pää varovasti (vastapäivää kiertäen).



12
Pyyhi katetrin pää varovasti alkoholiliinalla



13
Napsauta katetrin päähän uusi korkki.



14
Pyyhi iho haavan ympäriltä alkoholiliinalla.



15
Aseta katetri rullalle pehmeän sidoksen päälle.



16
Peitä katetri sidoksilla, ja aseta läpinäkyvä peiteliina paikoilleen.



17
Peiteliina asetettu paikoilleen.

Rocket® IPC™ Drainage Kit

ROCKET IPC DREENI, PIKAOHJEET - VALMISTELU JA KÄYTTÖ



1
Avaa pakkaus. Aseta pullo sinisen liinan reunalle. Varmista että pullon tyhjennysletku pysyy liinalla



Huom!

Jos käytössä on kuvan mukainen katetri:
Käytä tämän sivun ohjeita



OK



Älä käytä


OK=Käyttökunnossa
Tarkista pullon osoitin. Jos osoitin on kohonnut, hylkää pullo ja ota uusi pullo



3
Laita steriilit hanskat käteen



4
Avaa ja pudota adapterisetti (korkki ja adapteri), alkoholiliinat, taitokset suojapussista siniselle liinalle

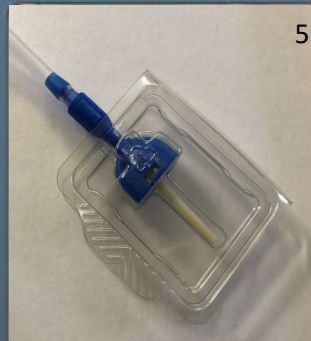

5
Poista pullostä kärjen suojus, ja aseta kärki siniselle liinalle



6.1

Työnnä ja lukitse adapteri tyhjennyspullon imuletkun päähän (klik)



6.2

Poista katettrin korkki ja pyyhi katettrin pää alkoholiliinalla

Rocket® IPC™ Drainage Kit

ROCKET IPC DREENI, PIKAOHJEET - VALMISTELU JA KÄYTTÖ



6.3

Kiinnitä katetri kiertämällä (klik)



7

Pidä toisella kädellä pulloa. Avaa valkoinen letkunsulkija



8

Dreenaus aloitetaan painamalla sinistä painiketta. Imutehoa voi säätää liukurilla. Dreenaus lopetetaan viemällä liukuri taakse



9

Kun dreenaus on valmis, irrota dreeniletku varovasti (vastapäivää kiertäen)




10

Pyyhi katettrin pää alkoholiliinalla ja laita katetriin uusi korkki



11

Pyyhi iho haavan ympäriltä alkoholiliinalla

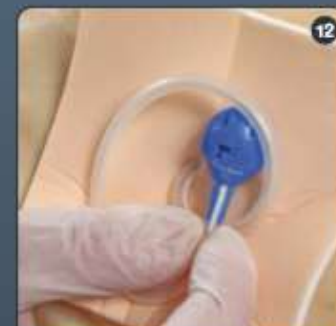

12

Aseta katetri rullalle vaahtotyynyn päälle



13

Peitä katetri sidoksilla, ja aseta läpinäkyvä peiteliina paikoilleen



14

Peiteliina asetettu paikoilleen